

BRAZO DE ENTRENAM.
DE INTRAVENOSA
MULTIFUNCIONAL

MOD. TMA/HS39



BRAZO DE ENTRENAM. DE INTRAVENOSA MULTIFUNCIONAL - TMA/HS39 TECH MODEL

Brazo completo de punción venosa:

1. Acceso venoso: V basílico 、 V cefálico 、 V digital 、 V metacarpiano dorsal 、 V basílico mediano 、 V cefálico accesorio 、 Sistema de punción venosa extenso V ante braquial mediano V 、 V cefálico mediano 、 V cubital mediano 、 Pulgar V.
2. Este revolucionario brazo de entrenamiento proporciona acceso venoso completo para terapia intravenosa y flebotomía, además de sitios para inyecciones intramusculares e intradérmicas. Un extenso sistema vascular de 8 líneas permite a los estudiantes practicar la venopunción en todas las ubicaciones primarias y secundarias, incluido el inicio de IVS y la introducción de catéteres sobre la aguja IV. El sistema venoso simplifica la instalación con una sola bolsa de líquido externa que suministra sangre artificial a todas las venas simultáneamente. La superficie dorsal de la mano incluye las venas metacarpianas, digital y del pulgar inyectables. La fosa ante cubital incluye las venas cefálicas media, basílica media y cubital media. La venopunción también se puede realizar a lo largo de las venas basílica, cefálica, cefálica accesorio y ante braquial mediana. La inyección intramuscular se puede realizar en el músculo deltoides y los lugares de inyección intradérmica se encuentran en la parte superior del brazo. Las inyecciones intramusculares en el músculo deltoides se ven reforzadas por la piel suave y realista y por los hitos

óseos naturales de la región. Las inyecciones intradérmicas con agua destilada crearán ronchas cutáneas características en los sitios designados en la parte superior del brazo.

3. El realismo del brazo de inyección y punción venosa avanzada es realmente asombroso. Los dedos suaves y flexibles se moldean por separado con extrema atención a cada detalle, ¡hasta las huellas dactilares! La flexión de la muñeca ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de manipulación. La piel reemplazable rueda a medida que se palpan las venas y se siente un "pop" perceptible al entrar en las venas. El proceso de moldeado reproduce los finos detalles de la piel para que el brazo luzca y se sienta vivo. Las válvulas en las venas se pueden ver y palpar en la superficie de la piel.

4. Las venas y pieles simuladas son completamente reemplazables para mantener este brazo de entrenamiento luciendo y funcionando como nuevo. Con un uso normal, se pueden realizar cientos de inyecciones antes de que sea necesario reemplazar las venas o la piel. Los kits de reemplazo completos están disponibles y son fáciles de usar. Para prolongar la vida útil de las venas, se dispone de sellador en aerosol para sellar perforaciones y evitar fugas.

